

Vous avez acheté un instrument rotatif **BTECH** et nous vous en remercions. N'oubliez pas que **l'entretien est essentiel !**

Réviser votre instrumentation rotative **une fois par an**, auprès de votre service technique.

STÉRILISER
À l'autoclave en utilisant le cycle prion : 134°C pendant 18 minutes, après la mise sous sachet.

STOCKER

VÉRIFIER

L'air du compresseur doit être propre et sec, la pression doit être celle recommandée par le fabricant, les joints du raccord doivent être en parfait état.

UTILISER

**PRÉ-DÉSINFECTER
NETTOYER**

LUBRIFIER

Tous vos instruments rotatifs après chaque utilisation.

LES ÉTAPES

Retrouvez notre gamme de produits rotatifs

fr

L'entretien est essentiel pour maintenir
leurs performances et leur longévité



TURBINE

TR-720 L



TURBINE

TI-940 L

TITANIUM



CONTRA-ANGLE

IMPLANT L-2000



CONTRA-ANGLE

RED L-200



CONTRA-ANGLE

BLUE L-40



HANDPIECE

HP-40

Retrouvez toute la gamme 3TECH en exclusivité chez **GACD** et **Promodentaire**
Rejoignez-nous sur www.3tech-dental.fr

Dispositifs médicaux de classe IIa. Turbine TR-720 L, Turbine TI-940 L : Marquage CE0120. Organisme certificateur : SGS UK Limited. Contra-angle Blue L-40 : Marquage CE0123. Organisme certificateur : TÜV SÜD. Contra-angle IMPLANT L-2000, Contra-angle RED L-200, Handpiece HP-40 : Marquage CE0197. Organisme certificateur TÜV Rheinland.

3TECH

Ref : protocoleentretien3techfr-v3-02/2020